



Guide de démarrage rapide

Télécommande Vercise GENUS™



La télécommande est un dispositif portatif qui vous permet
de communiquer avec votre stimulateur

► VUE D'ENSEMBLE

Votre télécommande communique **via Bluetooth** avec votre stimulateur.

Elle est destinée à :

- **vérifier le niveau de la batterie** de votre stimulateur,
- **contrôler vos paramètres de stimulation** pour les adapter à vos besoins, selon les autorisations faites par votre médecin.



► BOUTONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

Sur le côté droit de la télécommande se trouve le bouton **Verrouiller/Déverrouiller** 🔒.

Sur le côté gauche se trouvent le bouton **Accueil** 🏠 et le bouton **Programmes**.

Sur la façade de la télécommande se trouvent les boutons :

- **Stimulation Marche/Arrêt** ⏻
- **-** et **+** qui permettent d'ajuster les réglages tels que le volume et la luminosité de l'écran de la télécommande.
- **Navigation** ⏪ ⏩ qui permettent de naviguer dans les divers menus.

Les icônes en haut de l'écran **Accueil** indiquent le niveau de charge de la batterie de la télécommande 📶 🔋 ainsi que le numéro de programme en cours d'utilisation.

Remarque : si vous appuyez sur le **bouton Accueil** à partir des autres menus, vous reviendrez à l'écran Accueil.




► RECHARGE DE LA TÉLÉCOMMANDE

Si vous êtes porteur d'un stimulateur rechargeable GENUS™, lorsque vous déverrouillez votre télécommande, vous avez la possibilité de visualiser la charge de votre implant sur l'écran d'accueil.



Quand la télécommande a un **niveau de batterie faible**, elle affiche un message « **Recharger télécommande maintenant** ».

- Pour recharger votre télécommande, insérez le câble dans **le port USB** et branchez-le dans une **prise électrique**.

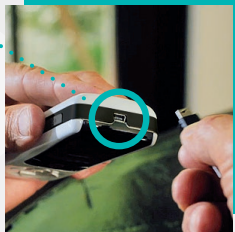

► DÉMARRER OU ARRÊTER LA STIMULATION




- Pour commencer, appuyez sur le **bouton « déverrouiller »** situé sur le côté droit de votre télécommande et le maintenir enfoncé **3 secondes**.




Si le soleil central est **vert** :
votre stimulation est **active**



Si le soleil central est **gris** :
votre stimulation est **éteinte**

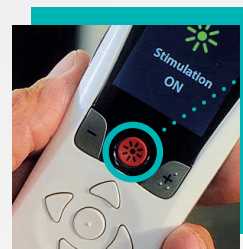

- Vous pouvez activer ou désactiver la stimulation en appuyant sur le bouton rouge  situé au centre de votre télécommande.

Généralement, des modifications du niveau de stimulation ne sont pas autorisées à partir de la télécommande. Si votre médecin vous autorise à modifier vos programmes de stimulation ou votre niveau de stimulation alors cette page vous concerne.

► MODIFIER LE PROGRAMME DE STIMULATION

Si votre médecin a paramétré différents programmes de stimulation pour vous, vous pouvez y accéder en quelques clics :



Vous pouvez soit :

- Appuyer sur le bouton « **Programmes** » situé sur le côté gauche de votre télécommande.

Soit :



- Cliquer sur la **flèche droite** pour visualiser le **menu principal**.
- Cliquer sur la **flèche droite** une deuxième fois pour entrer dans le **menu « Programmes »**.
- Cliquer sur la **flèche droite** une troisième fois pour entrer dans le **menu « Changer de programme »**.





- À partir de là, vous pouvez **naviguer dans les différents programmes** avec les **flèches haut et bas**.
- **Sélectionner le programme souhaité** en cliquant sur la **flèche droite** une dernière fois.

► AUGMENTER OU DIMINUER LA STIMULATION

Si votre médecin vous autorise à modifier votre niveau de stimulation, vous pourrez facilement le faire avec votre télécommande :



- Tout d'abord, cliquer sur la **flèche droite** pour visualiser le menu principal.
- Ensuite, cliquer sur la **flèche du bas** et sélectionner « **stimulation** » en appuyant sur le bouton rond blanc central.

Vous pouvez ensuite utiliser les boutons  ou  situés de part et d'autre du bouton Marche/Arrêt pour **ajuster la stimulation** au niveau qui vous convient sur le côté de votre corps sélectionné.



► CONSEILS D'UTILISATION

- Pour votre information, l'écran de votre télécommande s'éteint après environ une minute d'inactivité, pour se mettre en veille.
- Si votre stimulateur ne répond pas à la télécommande, essayez de **rapprocher la télécommande de votre stimulateur.**
- N'oubliez pas que **le stimulateur ne peut pas communiquer avec la télécommande pendant le rechargement.**

Pour accéder à la vidéo sur l'utilisation de la télécommande, rendez vous sur :
www.mastimulationboston.fr



**Boston
Scientific**
Faire progresser la science,
pour la vie®